



HR-501 시리즈 자동심장충격기 점검 매뉴얼



응급상황에서 반드시 작동될 수 있도록
정기적으로 관리해주시기 바랍니다.

AED 점검 매뉴얼 HR-501시리즈



1. 건물 내 [AED 관리책임자]를 지정합니다.
2. [AED 관리책임자]는 장비 관리, 사용내역 관리, 사용법 숙지 및 사용자 교육을 담당합니다.
3. [AED 관리책임자]는 매월 1일을 자동심장충격기 점검의 날로 지정하고, 정기점검을 실시하여 자동심장충격기를 항상 사용 가능하도록 관리합니다.

※ 본사 홈페이지 자료실에서 점검표를 다운로드 받으실 수 있습니다. www.radian.co.kr

01. 상태 표시등 확인

- 제품 손잡이 아래 투명한 램프에 **파란색 불빛이 20~30초 간격으로 한 번 반짝이는지 확인**합니다.
- 제품 또는 배터리 잔량에 **이상**이 있을 경우 **빨간색 불빛이 반짝**이거나 불빛이 들어오지 않습니다.



- 파란색 불빛 : 제품 정상
- 빨간색 불빛 : A/S 문의 (1670-1980)

※ 불빛이 들어오지 않는 경우
제품 뒷면의 배터리를 분리하였다가 다시 장착해주세요.
그래도 불빛이 들어오지 않는다면 A/S 문의바랍니다.

02. 소모품 교체시기 확인 (전극 패드, 배터리)



LOT RD201102A
2023-02-01

- 패드 포장지에 **유효기간**이 표기되어 있습니다.
- 사용을 하였거나 유효기간(2년)이 지난 패드는 새제품으로 교체바랍니다.
- ★패드는 **밀봉된 상태로 보관**해야 하며, 응급상황 시 AED를 사용할 때만 뜯어서 사용하시기 바랍니다.



2020-02

- 배터리에 **제조년월**이 표기되어 있습니다.
- 제조년월 (혹은 장착일)로부터 4년이 지난 경우 새 배터리로 교체바랍니다.
- 4년이 지나지 않아도 2회 이상의 전기 충격을 사용한 경우 새 배터리로 교체해주시기 바랍니다.

03. 외관 및 보관함 확인

- AED는 전자기기의 특성상 온도와 습도에 민감하므로 반드시 **실내 보관**해주시기 바랍니다.
(온도 : 0~40°C 습도: 5~95%)
- 보관함 문을 열고 닫았을 때 **경보음이 제대로 작동하는지 확인**해주시기 바랍니다.
- 경보음이 들리지 않는 경우, ON/OFF 스위치 확인 및 건전지 교체가 필요합니다.

카카오톡 채널에서 실시간 상담이 가능합니다.
A/S 고객센터 1670-1980





HR-503 / HR-503A / HR-503-KT

HR-503시리즈 자동심장충격기 점검 매뉴얼



응급상황에서 반드시 작동될 수 있도록
정기적으로 관리해주시기 바랍니다.

AED 점검 매뉴얼 HR-503시리즈



1. 건물 내 [AED 관리책임자]를 지정합니다.
2. [AED 관리책임자]는 장비 관리, 사용내역 관리, 사용법 숙지 및 사용자 교육을 담당합니다.
3. [AED 관리책임자]는 매월 1일을 자동심장충격기 점검의 날로 지정하고, 정기점검을 실시하여 자동심장충격기를 항상 사용 가능하도록 관리합니다.

※ 본사 홈페이지 자료실에서 점검표를 다운로드 받으실 수 있습니다. www.radian.co.kr

01. 상태 표시등 확인

- 제품의 우측 상단 LCD창에 ● 표시를 확인해주시기 바랍니다.
- 제품 또는 배터리에 이상이 있을 경우 ⊗ 표시가 뜹니다.



🔋 ⊗ → 배터리 교체 필요

음성안내 : “배터리를 곧 교체해야 합니다.”

배터리 잔량이 1칸 이상 남아있어도 ⊗ 표시가 뜨는 경우 A/S 문의바랍니다. (1670-1980)

02. 소모품 교체시기 확인 (전극 패드, 배터리)



LOT RD210308A
2023-06-07

- 패드 포장지에 유효기간이 표기되어 있습니다.
- 사용을 하였거나 유효기간(2년)이 지난 패드는 새제품으로 교체바랍니다.
- ★패드는 밀봉된 상태로 보관해야 하며, 응급상황 시 AED를 사용할 때만 뜯어서 사용하시기 바랍니다.



2020-02

- 배터리에 제조년월이 표기되어 있습니다.
- 제조년월 (혹은 장착일) 로부터 4년이 지난 경우 새 배터리로 교체바랍니다.
- 4년이 지나지 않아도 2회 이상의 전기 충격을 사용한 경우 새 배터리로 교체해주시기 바랍니다.

03. 외관 및 보관함 확인

- AED는 전자기기의 특성상 온도와 습도에 민감하므로 반드시 실내 보관해주시기 바랍니다.
(온도 : 0~40°C 습도 : 5~95%)
- 보관함 문을 열고 닫았을 때 경보음이 제대로 작동하는지 확인해주시기 바랍니다.
- 경보음이 들리지 않는 경우, ON/OFF 스위치 확인 및 건전지 교체가 필요합니다.

카카오톡 채널에서 실시간 상담이 가능합니다.
A/S 고객센터 1670-1980





HR-701 시리즈 자동심장충격기 점검 매뉴얼



응급상황에서 반드시 작동될 수 있도록
정기적으로 관리해주시기 바랍니다.

AED 점검 매뉴얼 HR-701시리즈




1. 건물 내 [AED 관리책임자]를 지정합니다.
2. [AED 관리책임자]는 장비 관리, 사용내역 관리, 사용법 숙지 및 사용자 교육을 담당합니다.
3. [AED 관리책임자]는 매월 1일을 자동심장충격기 점검의 날로 지정하고, 정기점검을 실시하여 자동심장충격기를 항상 사용 가능하도록 관리합니다.


※ 본사 홈페이지 자료실에서 점검표를 다운로드 받으실 수 있습니다. www.radian.co.kr

01. 상태 표시등 확인

- 제품의 우측 상단 LCD창에 ● 표시를 확인해주시기 바랍니다.
- 제품 또는 배터리에 이상이 있을 경우 ⊗ 표시가 뜹니다.

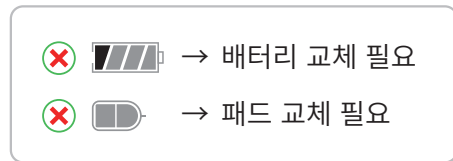

02. 소모품 교체시기 확인 (전극 패드, 배터리)

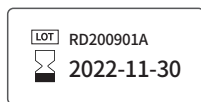

- 패드 포장지에 유효기간이 표기되어 있습니다.
- 사용을 하였거나 유효기간(2년)이 지난 패드는 새제품으로 교체바랍니다.
- ★패드는 밀봉된 상태로 보관해야 하며, 응급상황 시 AED를 사용할 때만 뜯어서 사용하시기 바랍니다.



- 배터리에 제조년월이 표기되어 있습니다.
- 제조년월 (혹은 장착일) 로부터 4년이 지난 경우 새 배터리로 교체바랍니다.
- 4년이 지나지 않아도 2회 이상의 전기 충격을 사용한 경우 새 배터리로 교체해주시기 바랍니다.

03. 외관 및 보관함 확인

- AED는 전자기기의 특성상 온도와 습도에 민감하므로 반드시 실내 보관해주시기 바랍니다. (온도 : 0~40°C 습도: 5~95%)
- 보관함 문을 열고 닫았을 때 경보음이 제대로 작동하는지 확인해주시기 바랍니다.
- 경보음이 들리지 않는 경우, ON/OFF 스위치 확인 및 건전지 교체가 필요합니다.

카카오톡에서 실시간 상담이 가능합니다.
A/S 고객센터 1670-1980

